

Las instrucciones siguientes son para restablecer los procesadores del MK4 intra y Extra-X/Xtender SOLAMENTE.

Si la luz de la TEMPERATURA BAJA está encendido y que no se apaga después de que su procesador de la película se ha encendido durante 15 minutos, la sobrecarga térmica puede ser necesario reiniciar. Siga las siguientes instrucciones para restablecer la sobrecarga térmica.

1. Encienda el equipo está apagado.
2. Quite el cable de alimentación de entrada.
3. Retire el tornillo situado por encima de la toma de corriente de entrada.
4. Retire la tapa del pequeño, de control blanco.
5. Retire el panel lateral que estaba debajo de la tapa pequeña, el control blanco. Para quitar el panel lateral a cabo un destornillador de punta plana hasta la mitad de la costura exterior, donde el panel lateral se encuentra con el panel posterior. Gire el destornillador hacia la derecha para doblar el panel trasero un poco lejos del panel lateral. Mantenga el destornillador en esta posición, mientras que agarrar la parte superior del panel lateral y tire de ella hacia arriba. Haga lo mismo en el panel lateral se encuentra con el panel frontal. Pon tu destornillador de punta plana hasta la mitad de la costura exterior, donde el panel lateral se encuentra con el panel frontal y gire el destornillador hacia la derecha mientras tira hacia arriba en el panel lateral, al mismo tiempo. Ahora debería ser capaz de quitar el panel lateral.
6. **Si su máquina es una Intra-X** usted debe ver el revelador y fijador calentadores químicos situados en el interior de la máquina hacia la parte inferior del lado izquierdo, después de retirar el panel lateral. Busque naranja, rojo, cables azul y verde / amarillo que van a los calentadores. Situado entre el promotor y los calentadores de fijador químicos es una pieza de negro, con forma de moneda de diez centavos de plástico con un botón rojo en la parte superior. Esta es su restablecimiento de sobrecarga térmica. Pulse el botón rojo en un par de veces. Usted puede hacer esto con un largo, destornillador de punta plana. Usted puede sentir que retroceder en el lugar o puede que no sienta lo empuje en su lugar. En cualquier caso, si se metió, ahora se restablece.
7. **Si su máquina es un Extra-X/Extender** localizar el desarrollador y los colectores de fijador de la química del calentador. Deben estar fuera de color blanco y se asemejan a las tuberías de PVC. En cada colector será un pedazo de negro, con forma de moneda de diez centavos de plástico con un botón rojo en la parte superior. Estos son sus restablece sobrecarga térmica. Pulse el botón rojo en los colectores de revelador y fijador un par de veces. Usted puede

sentir que retroceder en el lugar o puede que no sienta lo empuje en su lugar. En cualquier caso, si se metió, ahora se restablece.

8. Vuelva a colocar el panel lateral.

9. Vuelva a colocar la tapa de la pequeña, el control blanco.

10. Vuelva a colocar el tornillo que se encuentra por encima de la toma de corriente de entrada.

11. Vuelva a conectar el cable de su máquina de potencia de entrada.

12. Encienda la máquina está encendida.

13. La máquina comenzará con un ciclo de iniciación. Esto es normal. Dale a tu equipo hasta 15 minutos para que los productos químicos para calentar a la temperatura adecuada. Cuando se calienta adecuadamente la luz de la TEMPERATURA BAJA se apagará. Ahora se puede procesar la película.

14. Si después de 15 minutos, la luz de la TEMPERATURA BAJA sigue en pie, por favor llame a soporte técnico.